

Cosmopor®

Transparent



Descrição do produto

Cosmopor® Transparent é uma cobertura de película transparente, autoadesiva, composta por uma película em poliuretano semipermeável, impermeável à água, revestida com um adesivo de poliacrilato e que tem uma compressa absorvente no meio. A compressa é constituída por fibras de viscosa e coberta por uma rede de polietileno, que funciona como uma camada de contato, não aderente.

Propriedades

A compressa absorve o exsudado e não adere à ferida. A película semipermeável de poliuretano é revestida por um adesivo. A película facilita a passagem de vapor de água e gases, mas é impermeável.

Utilização prevista

Cosmopor® Transparent é uma cobertura de película transparente não invasiva, de utilização única e autoadesiva. Destina-se a ser utilizada em condição estéril, por profissionais de saúde e leigos, para os cuidados pós-operatórios de feridas levemente exsudativas, para a proteção contra a penetração de bactérias e para utilização como cobertura de ferimentos agudos. A cobertura pode permanecer aplicada por até 5 dias. Recomenda-se que o estado da ferida seja avaliado pelo profissional de saúde, para determinar quando a cobertura deve ser substituída.

O tempo de tratamento total não deve exceder os 30 dias.

Indicação

Cosmopor® Transparent pode ser utilizado para os cuidados pós-operatórios de feridas levemente exsudativas, para a proteção contra a penetração de bactérias e para utilização como cobertura para ferimentos agudos.

Contraindicações

Cosmopor® Transparent não deve ser utilizado em feridas clinicamente infectadas, altamente hemorrágicas ou exsudativas, nem em lesões por pressão.

Modo de Utilização

Limpe bem a área de aplicação e certifique-se de que a pele esteja seca e sem cremes ou pomadas.


As zonas com pelos devem ser aparadas antes de aplicar o Cosmopor® Transparent.

(I) Abra a embalagem e retire a cobertura. Cosmopor® Transparent é protegido por 4 coberturas, enumeradas de 1 a 4, por ordem de aplicação. Retire levemente as coberturas protetoras 1 e 2 e, em seguida;

(II) Coloque o lado adesivo do Cosmopor® Transparent com a compressa virada para a ferida, garantindo que cubra-a completamente. Retire totalmente as coberturas protetoras 1 e 2, pressione levemente a película contra a pele, ajustando-a aos contornos do corpo;

(III) Remova a cobertura protetora 3 e, em seguida;

(IV) Retire a cobertura protetora 4 e pressione levemente contra a pele.

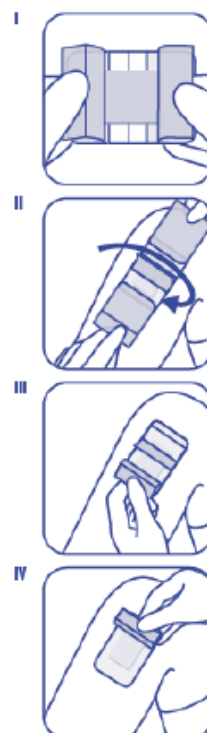

Cosmopor®

Transparent

Cosmopor® Transparent pode ser retirado de um modo praticamente indolor, esticando bem o material. Para isso, solte uma extremidade e remova cuidadosamente a cobertura ao esticá-la.

Precauções Especiais

A reutilização de dispositivos médicos de uso único é perigosa. O reproprocessamento de dispositivos, com vista à sua reutilização, pode danificar gravemente sua integridade e seu desempenho.

Descarte do Produto

Para minimizar o risco de possíveis perigos de infecção ou poluição ambiental, os componentes descartáveis do dispositivo médico devem ser descartados em conformidade com os procedimentos dispostos nas leis, regras, regulamentos e normas de prevenção de infecção. Elimine o dispositivo médico juntamente com os resíduos domésticos.

Armazenamento e Transporte

Armazene este produto em local fresco, ventilado, seco, ao abrigo da luz em temperaturas até 30°C.

Esterilização: Óxido de Etileno

Validade: 5 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha

Resp. Tec.: Camila S. S. Tavares. CREA – SP 5062442178

Código	Curativo	QTD Embalagem
9010510	5 x 7,2 CM	50
9010550	9 X 15 cm	25
9010560	10 X 12 CM	25
9010590	10 x 25 CM	25
9010600	10 x 30 CM	25



Para saber mais sobre nossos produtos ou fazer um pedido, entre em contato com Hartmann em +55 (11) 3168-0226, comercial@hartmannbr.info ou visite hartmann.info/pt-BR

Registros Anvisa

