

HydroClean®

Descrição

O HydroClean® é uma cobertura hidroativa com tecnologia hidrorresponsiva, cujo principal componente é um poliacrilato superabsorvente (SAP) incorporado em fibras de celulose e ativado (pré-umedecido) com a solução de ringer. A camada da cobertura que entra em contato com a ferida é composta por uma malha de polipropileno com fitas de silicone. A camada em contato com a pele e as fitas de silicone impedem a aderência da cobertura ao leito da ferida. No lado oposto a ferida, uma película de polipropileno impermeável a água revestida de um não tecido de polipropileno hidrofóbico, impede que a cobertura seque prematuramente. Isso faz com que o leito da ferida fique úmido por até três (3) dias, enquanto a película de polipropileno evita que a superfície externa da cobertura fique molhada.

Composição

Celulose, Poliacrilato, Solução de Ringer, Polipropileno e Silicone.

Mecanismo de ação

O HydroClean® faz com que a solução de ringer penetre na ferida durante três dias. Uma vez que a cobertura absorve o exsudato simultaneamente é iniciada uma limpeza interativa e contínua da ferida.

Indicações

O HydroClean® é adequado para tratamento úmido de feridas e deve ser utilizado por profissionais de saúde ou leigos, desde que devidamente treinados por profissionais de saúde. O HydroClean® é indicado para a gestão de feridas secas, com leve a moderado exsudato, especialmente as propensas a problemas no processo de cicatrização.

O produto é indicado sobretudo para tratamento de feridas crônicas e de cicatrização difícil na fase de limpeza e granulação. O HydroClean® também pode ser utilizado para a limpeza de feridas infectadas.

Aplicação e Troca

Realize a limpeza da ferida seguindo as instruções do profissional de saúde ou protocolo institucional.

A aplicação da cobertura deve ser feita de acordo com as normas médicas vigentes. Ela pode ser feita especialmente em condições assépticas.

O lado branco da cobertura, que fica voltado a ferida, não deve ser tocado com mãos/ luvas ou instrumentos não esterilizados.

HydroClean® é aplicada com o lado branco da cobertura sobre a ferida, de forma que a inscrição azul fique voltada para cima. HydroClean® tem de ficar em contato direto com o leito da ferida e sobrepor-se às bordas da ferida.



As feridas profundas podem ser preenchidas com HydroClean® Cavity e cobertas como HydroClean®.

HydroClean® deve ser fixado com materiais indicados para retenção da cobertura. A cobertura HydroClean® também é adequada para combinação com terapias compressivas.

A cobertura pode permanecer no leito da ferida por até três dias, dependendo da recomendação do profissional da saúde.

A cobertura pode ser trocada caso a capacidade de absorção tenha sido exaurida ou ela seque prematuramente.

Na maioria dos casos, é possível retirar o HydroClean® sem agravar a dor. Se aderir à ferida, umedeça com solução fisiológica salina ou solução de ringer antes de removê-la, para soltar a aderência por completo.

Precauções especiais

- O tratamento com HydroClean não substitui o tratamento das causas dos problemas de cicatrização.
- Antes do tratamento de feridas propensas a problemas de cicatrização, é necessário que um profissional de saúde avalie a situação da ferida e as causas dos problemas.
- HydroClean® não pode ser cortado nem danificado mecanicamente.
- Caso a cobertura HydroClean® seja aplicada na planta do pé, evite ficar em pé ou caminhar para que a cobertura não rompa. Se a cobertura for danificada, as partículas e as fibras do SAP podem entrar em contato com a ferida. Elas devem ser lavadas com uma solução fisiológica salina ou solução de ringer.
- Feridas infectadas e fortemente contaminadas por bactérias devem ser tratadas sob vigilância de um profissional de saúde.
- HydroClean® não é recomendado para o tratamento de feridas necróticas e secas nos pés causadas pela doença arterial obstrutiva.
- Em caso de queimaduras de terceiro grau, antes de usar HydroClean®, realize primeiro o tratamento cirúrgico.
- Medicamentos tópicos ou desinfetantes não devem ser aplicados durante o tratamento com HydroClean®. A cobertura pode absorver ou comprometer de algum modo a eficácia dos agentes.
- HydroClean® não pode ser utilizado para tratar feridas altamente exsudativas.

HydroClean®

- Se a região da ferida estiver particularmente sensível e afetada, recomenda-se que a pele seja protegida com um preparado indicado para proteção cutânea.
- Em pacientes com risco de hemorragias (Exemplo: devido a medicamentos anticoagulantes), o HydroClean® deve ser retirado com cuidado especial no momento da troca. Se necessário, o HydroClean® deve ser umedecido primeiro com solução fisiológica salina ou solução de ringer, como descrito acima.
- A segurança e a eficácia em crianças e gestantes não foram pesquisadas.

Contraindicações

Não use o HydroClean® em pacientes que tenham intolerância a qualquer um de seus componentes.

Instruções especiais

A reaplicação do HydroClean® pode ocasionar irritação da pele, retardamento do tempo de cicatrização, dores e/ou infecções. O reprocessamento de dispositivos, feito com o intuito de reutilizá-los, pode danificar gravemente sua integridade e seu desempenho.

Armazenamento e Transporte

Armazene este produto em local fresco, ventilado, seco, ao abrigo da luz em temperatura entre 15 a 30°C.

Descarte

Para minimizar o risco de possíveis perigos de infecção ou poluição ambiental, os componentes descartáveis do HydroClean® devem ser eliminados em conformidade com as leis, regras, regulamentos e normas de prevenção de infecção aplicáveis e locais.

Esterilização: Esterilização a Vapor

Validade: 3 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha - Origem Polônia

Resp. Tec.: Camila S. S. Tavares. CREA – SP 5062442178

Código	Tamanho do Curativo	QTD por Caixa
6092242	5,5 cm	10
6092262	7,5 x 7,5 cm	10
6092282	10 x 10 cm	10



Para saber mais sobre nossos produtos ou fazer um pedido, entre em contato com Hartmann em +55 (11) 3168-0226, comercial@hartmannbr.info ou visite hartmann.info/pt-BR

Registros Anvisa