

Hydroclean®

Cavity e Mini

Descrição

O HydroClean® Cavity e o Hydroclean® Mini são preenchedores de cavidade, hidroativos com tecnologia hidrorresponsiva, seu principal componente é um poliacrilato superabsorvente (SAP) impregnado em fibras de celulose e ativado (pré -umedecido) com solução de ringer. A cobertura está envolta em uma malha de polipropileno.

Propriedades e modo de ação

O HydroClean® Cavity/Mini faz com que a solução de ringer entre em contato com a ferida durante três dias. Uma vez que o curativo absorve o exsudato simultaneamente, é iniciada uma limpeza interativa e contínua da ferida.

Uso pretendido

O HydroClean® Cavity/Mini é adequado para tratamento úmido de feridas. A cobertura deve ser utilizada por profissionais de saúde ou leigos, desde que devidamente treinados por profissionais de saúde.

Indicações

O HydroClean® Cavity/Mini é indicado para o preenchimento de cavidades e a gestão de feridas secas, com leve a moderado exsudato, especialmente as propensas a problemas no processo de cicatrização.

O produto é indicado sobretudo para tratamento de feridas crônicas e de cicatrização difícil na fase de limpeza e granulação. O HydroClean® Cavity/Mini também pode ser utilizado para o tratamento de feridas infectadas.

Aplicação e Troca

- Realize a limpeza da ferida seguindo as instruções do profissional de saúde ou protocolo institucional;
- A troca da cobertura deve ser feita de acordo com as normas médicas vigentes;
- Ela pode ser feita especialmente em condições assépticas. Sendo assim, não deve ser tocada com mãos/ luvas ou instrumentos não esterilizados;
- A cobertura pode permanecer por até 3 (três) dias, dependendo da recomendação do profissional da saúde;
- O Hydroclean® Cavity/Mini pode ser trocado caso a capacidade de absorção tenha sido exaurida ou ele seque prematuramente;
- O HydroClean® Cavity/ Mini também é adequado combinado com terapias compressivas.

Para feridas profundas:

- O HydroClean® Cavity/Mini é colocado na ferida;
- Deve ficar em contato com o leito da ferida;



- O HydroClean® Cavity/Mini deve ser coberto com um curativo HydroClean®;
- O curativo HydroClean® superior deve se sobrepor às bordas da ferida;
- O HydroClean® deve ser fixado com materiais indicados para retenção da cobertura;
- Se as condições da ferida preenchida com o HydroClean® Cavity/Mini não permitirem que a cobertura seja coberta com um curativo HydroClean®, pode-se usar cobertura de película adesiva.

Para feridas menos profundas:

- HydroClean® Cavity/Mini é colocado na ferida;
- Deve ficar em contato com o leito da ferida;
- HydroClean® Cavity/Mini deve se sobrepor às bordas da ferida;
- O HydroClean® Cavity/Mini deve ser fixado com um curativo de película adesiva;
- Atente-se quanto ao tamanho do curativo de película adesiva, para que seja grande o suficiente para uma fixação firme. Isto se aplica em particular a áreas onde a fixação é bastante pressionada devido a movimentos. Ao usar um curativo de película adesiva, também é importante garantir que a solução de ringer não vaze pelo curativo em decorrência da pressão.
- Na maioria dos casos, é possível retirar o HydroClean® Cavity/Mini sem agravar a dor. Se a cobertura se aderir à ferida, umedeça-a com solução fisiológica salina ou solução de ringer antes de removê-la para soltar a aderência.

Precauções especiais

- Antes do tratamento de feridas propensas a problemas de cicatrização, é necessário que um profissional de saúde avalie a situação da ferida e as causas dos problemas;
- O tratamento com HydroClean® Cavity/Mini não substitui o tratamento das causas dos problemas de cicatrização;
- O HydroClean® Cavity/Mini não pode ser cortado nem danificado mecanicamente;
- Caso o HydroClean® Cavity/Mini seja aplicado na planta do pé, evite ficar em pé ou caminhar para que o curativo não rompa;
- Se o curativo for danificado, as partículas e as fibras do SAP podem entrar em contato com a ferida. Elas devem ser lavadas com uma solução fisiológica salina ou solução de ringer.

Hydroclean®

Cavity e Mini

- Feridas infectadas e fortemente contaminadas por bactérias devem ser tratadas sob vigilância de um profissional de saúde, em especial se for utilizado um curativo adesivo para fixação.
- O uso de curativos umectantes como o HydroClean® Cavity não é recomendado para o tratamento de feridas necróticas e secas nos pés causadas pela doença arterial obstrutiva.
- Em caso de queimaduras de terceiro grau, antes de usar o HydroClean® Cavity/ Mini, realize primeiro o tratamento cirúrgico;
- Medicamentos tópicos ou desinfetantes não devem ser aplicados durante o tratamento com o HydroClean® Cavity/Mini. A cobertura pode absorver ou comprometer de algum modo a eficácia dos agentes;
- O HydroClean® Cavity/Mini não pode ser utilizado para tratar feridas altamente exsudativas;
- Se a região da ferida estiver particularmente sensível e afetada, recomenda-se que a pele seja protegida com um preparado indicado para proteção cutânea;
- Em pacientes com risco de hemorragias (Exemplo: devido a medicamentos anticoagulantes), o HydroClean® Cavity/ Mini deve ser retirado com cuidado especial no momento da troca;
- Se necessário, o HydroClean® Cavity/Mini deve ser umedecido primeiro com solução fisiológica salina ou solução de ringer, como descrito acima;
- A segurança e a eficácia em crianças e gestantes não foram pesquisadas;

Contraindicações

Não use o HydroClean® Cavity/Mini em pacientes que tenham intolerância a qualquer um de seus componentes.

Efeitos colaterais

- No início do tratamento com o HydroClean® Cavity/Mini, o tamanho da ferida poderá aumentar devido a degradação de tecidos já irreversivelmente lesados. No entanto, isto pode ser um sinal de que a cicatrização se iniciou;
- Durante o tratamento úmido, pode ocorrer uma ruborização das bordas da ferida, o que geralmente é um sinal de reativação da circulação sanguínea em consequência do início da cicatrização. Contudo, as causas terão de ser sempre analisadas caso a caso;
- O tratamento com o HydroClean® Cavity/ Mini por si só não provoca dor. No entanto, uma ferida aberta costuma ser muito sensível a estímulos mecânicos. Deve-se analisar, conforme o caso, se é indicada uma terapia para a dor;
- Embora o tratamento úmido com solução de ringer não provoque maceração de células vitais, uma camada esbranquiçada pode surgir em decorrência do inchaço das calosidades nas plantas dos pés;



- Em casos raros, foi observada a ativação não específica de músculos glúteos e das pernas em pacientes paraplégicos com feridas sacrais. Os sintomas foram imediatamente resolvidos após a remoção da cobertura.

Descarte

Para minimizar o risco de possíveis perigos de infecção ou poluição ambiental, os componentes descartáveis do HydroClean® Cavity/Mini devem ser eliminados em conformidade com as leis, regras, regulamentos e normas de prevenção de infecção aplicáveis e locais.

Instruções especiais

A reaplicação do HydroClean® Cavity/Mini pode ocasionar irritação da pele, retardamento do tempo de cicatrização, dores e/ou infecções. O reprocessamento de dispositivos, feito com o intuito de reutilizá-los, pode danificar gravemente sua integridade e seu desempenho.

Armazenamento e Transporte

Armazene este produto em local fresco, ventilado, seco, ao abrigo da luz em temperatura entre 15 a 30°C.

Esterilização: Esterilização a Vapor

Validade: 3 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha - Origem Polônia

Resp. Tec.: Camila S. S. Tavares. CREA – SP 5062442178

Código	Tamanho do Curativo	QTD por Caixa
6090062	5,5 cm Redondo	10
6090042	4 x 8 cm Oval	10
6090082	7,5 x 7,5 cm Quadrado	10
6090012	3 cm MINI	10



Para saber mais sobre nossos produtos ou fazer um pedido, entre em contato com Hartmann em +55 (11) 3168-0226, comercial@hartmannbr.info ou visite hartmann.info/pt-BR

Registros Anvisa

HARTMANN

