

Hydrocoll®

Hydrocoll, Hydrocoll Sacral e Hydrocoll Thin

Descrição

O Hydrocoll é uma cobertura de hidrocolóide absorvente, adesivo, coberto com uma película impermeável a líquidos e bactérias, e permeável ao vapor. Ao absorver o exsudato se transforma em gel e promove o meio úmido para o processo de cicatrização.

Indicação

Hydrocoll é indicado para o tratamento de feridas com exsudato leve a moderado. Pode ser utilizado no tratamento de lesões de membros inferiores, lesões por pressão, queimaduras de segundo grau e escoriações. Hydrocoll sacral possui um formato específico para o tratamento de região sacral; Hydrocoll Thin, deve ser utilizado preferencialmente durante a fase de epitelização.

Tempo de Troca

Pode permanecer até sete dias de acordo com o protocolo da instituição.

Contra indicações

Não utilizar Hydrocoll em áreas ósseas, músculos e tendões, em feridas clinicamente infectadas, infecções provocadas por fungos ou em queimaduras de 3º grau.

Composição

Filme de poliuretano transparente, Carboximetilcelulose Sódica e Copolímero de Acrilato.

Instruções de Uso

Escolher a melhor opção de Hydrocoll de acordo com a lesão. Hydrocoll/Hydrocoll Thin: retirar o liner, colocar o curativo. Hydrocoll Sacral: retirar o liner, aplicar o curativo de acordo com seu formato.

Hydrocoll Côncavo para calcanhares e cotovelos: retirar a parte maior do papel de proteção, posicionar a seção média do curativo sobre a ferida, retirar o restante do papel de proteção e colar as abas uma sobre a outra.



Através da absorção do exsudato, cria-se um gel esbranquiçado visível externamente e formação de uma bolha. Em caso de fuga do exsudato, a cobertura deverá ser trocada imediatamente. Para remover o Hydrocoll, levantar as bordas e tracionar lentamente para evitar lesões na pele perilesional.

Precauções

- Manter fora do alcance de crianças.
- Não reesterilizar.
- Não utilizar caso a embalagem esteja danificada.
- Antes de cada tratamento da ferida com dificuldade de cicatrização é necessária uma avaliação médica da situação da ferida e das causas da dificuldade de cicatrização.
- O tratamento com Hydrocoll não substitui o tratamento da causa da dificuldade de cicatrização.

Armazenagem e transporte

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores. Armazenar em local seco e fresco, em temperatura máxima de 30°C e ao abrigo da luz solar direta.

Validade: 5 anos.

Fabricante: Paul Hartmann AG – Alemanha

Esterilizado por radiação

Resp. Tec.: Camila S. S. Tavares. CREA – SP 5062442178

Código	Tamanho do Curativo	QTD por Caixa
900938	10 x 10 cm	10
900939	15 x 15 cm	10
9009401	20 x 20 cm	10
900945	18 x 18 cm Sacral	10
900942	10 x 10 cm Thin	10
9009431	15 x 15 cm Thin	10



Para saber mais sobre nossos produtos ou fazer um pedido, entre em contato com Hartmann em +55 (11) 3168-0226, comercial@hartmannbr.info ou visite hartmann.info/pt-BR

Registros Anvisa

HARTMANN
+