

Hydrofilm®

Descrição do produto

Hydrofilm® é uma cobertura de película transparente, autoadesivo, composta por uma película em poliuretano revestida com um adesivo de poliacrilato semipermeável, que é impermeável a água, bactérias e contaminantes externos, porém permite a passagem de vapor de água.

Composição


Poliuretano e adesivo acrilato.

Indicação

Hydrofilm® destina-se a ser utilizado em condição estéril, para a proteção contra a penetração de bactérias, contaminantes externos e irritação mecânica de feridas secas, para feridas de cicatrização primária e para feridas em epitelização praticamente cicatrizadas. Destina-se igualmente à utilização por profissionais de saúde para fixação de curativos, cateteres e cânulas. Além disso, os profissionais de saúde podem utilizar Hydrofilm® na terapia de feridas por pressão negativa com Vivano® System como elemento selante em pele intacta.

Instruções de uso

- Limpe bem a área de aplicação e certifique-se de que a pele fica seca e sem cremes ou pomadas;
- As zonas com pelos devem ser aparadas antes de aplicar Hydrofilm®;
- Abra a embalagem e retire a cobertura. Hydrofilm® é protegido por 4 layers, enumeradas de 1 a 4, por ordem de aplicação;
- Retire ligeiramente os layers protetoras 1 e 2 e, em seguida, coloque o lado adesivo do Hydrofilm® sobre a ferida ou cateter/cânula;
- Retire totalmente os layers protetores 1 e 2, pressione ligeiramente a película contra a pele, ajustando-a aos contornos do corpo;
- Remova o layer protetor 3 e, em seguida retire o layer protetor 4 e pressione ligeiramente o Hydrofilm® contra a pele;
- Hydrofilm® pode ser retirado de modo praticamente indolor, esticando bem o material. Para isso, solte uma extremidade e remova cuidadosamente a cobertura ao esticá-la.

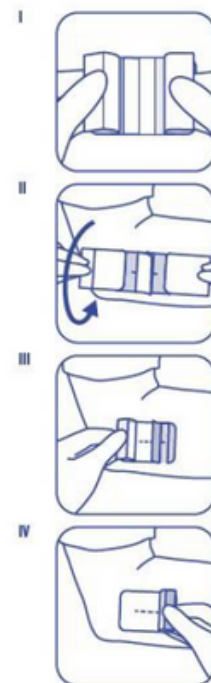

Tempo de Troca

Hydrofilm® pode permanecer por até 5 dias. Contudo, recomenda-se que o estado da ferida seja sujeito a avaliação de profissional de saúde, para determinar quando a cobertura deve ser trocada. Pode ser aplicado imediatamente a seguir um novo dispositivo. O tempo de utilização total não deve exceder os 30 dias.

Contraindicação

Não deve ser aplicado diretamente sobre feridas infectadas, sangrantes ou altamente exsudativas.

Hydrofilm®

Precauções

Não deverá ser utilizada em lesões infectadas, com hipersensibilidade a um dos seus componentes.

Precauções especiais

A reutilização de dispositivos médicos de uso único é perigosa. O reprocessamento de dispositivos com vista à sua reutilização pode danificar gravemente a sua integridade e o seu desempenho. Informações disponíveis mediante solicitação.

Efeitos secundários

Podem ocorrer reações adversas em pacientes alérgicos ou hipersensíveis a adesivos acrílicos.

Descarte do produto

Para minimizar o risco de possíveis perigos de infecção ou poluição ambiental, os componentes descartáveis do dispositivo médico devem ser descartados em conformidade com os procedimentos dispostos nas leis, regras, regulamentos e normas de prevenção de infeção aplicáveis e locais. Elimine o dispositivo médico juntamente com os resíduos domésticos.

Armazenamento e Transporte

- Armazene este produto em local fresco, ventilado, seco, ao abrigo da luz em temperaturas até 30°C.
- Produto estéril até que seja aberto, não utilizar caso a embalagem esteja violada.
- Não reesterilizar.
- O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores.



Código	Tamanho	QTD Embalagem
9700010	6 x 7 CM	100
9700050	10 X 15 CM	50
9700080	10 X 25 CM	25

Esterilização: Óxido de Etileno

Validade: 5 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha

Resp. Tec.: Camila S. S. Tavares. CREA – SP 5062442178



Para saber mais sobre nossos produtos ou fazer um pedido, entre em contato com Hartmann em +55 (11) 3168-0226, comercial@hartmannbr.info ou visite hartmann.info/pt-BR

Registros Anvisa

HARTMANN
+