

Hydrotac®

Descrição do produto

O Hydrotac® é uma cobertura em uma espuma de poliuretano permeável a gases, a prova de água e resistente a bactérias, e revestido com uma camada de hidrogel. O gel consiste em um polímero híbrido de poliureia / poliuretano hidratado contendo propilenoglicol.

Utilização prevista/Indicações

Hydrotac® destina-se ao tratamento de feridas com exsudato leve a moderado, nas fases de granulação e epitelização.

Hydrotac® destina-se a aplicação por profissionais de saúde e por usuários leigos treinados. Os profissionais de saúde poderão delegar a troca do curativo aos pacientes e/ou familiares (após instrução adequada).

Propriedades e modo de ação

Devido a sua estrutura, Hydrotac® consegue absorver o exsudado da ferida e liberar umidade. Deste modo, cria-se um ambiente úmido que estimula a cicatrização da ferida. Graças ao gel no lado da camada em contato com a ferida, a cobertura não adere na ferida, e possibilita troca atraumática.

O Hydrotac® conta com a tecnologia AquaClear. As propriedades de absorção da tecnologia AquaClear são projetadas para propiciar o acúmulo de fatores de crescimento no ambiente úmido da ferida. A combinação do elevado nível de fatores de crescimento e um ambiente de hidratação do leito da ferida tem sido indicado como fator para promoção do fechamento epitelial e, conseqüentemente, acelerar o processo de cicatrização.

Modo de aplicação

1. Limpe a ferida usando protocolos da instituição.
 2. Seque cuidadosamente a pele ao redor.
 3. Escolher o tamanho da cobertura de forma a que este exceda as bordas da ferida em cerca de 1 a 2 centímetros, dependendo da condição da pele a volta da ferida.
- Se for necessário, Hydrotac® pode ser recortado para obter o tamanho desejado, usando apenas tesouras esterilizadas. O recorte permite que o curativo seja facilmente aplicado e de forma adequada nos contornos do corpo e partes móveis, como juntas.



4. Retirar a película de proteção de acordo com a numeração (1 e 2) e colocar o cobertura com a face impregnada com gel voltada para a ferida. Para fixar, utilizar um curativo secundário adequado.

Garantir que todo o leito da ferida exposto fica totalmente coberto. As feridas profundas e fissuradas não devem ser tratadas com Hydrotac®. A troca da cobertura será necessária quando clinicamente recomendada ou quando houver exsudato visível nas bordas.

O Hydrotac® pode permanecer na ferida por até sete dias.

Para trocar a cobertura, descolar ligeiramente Hydrotac® num dos cantos e remover cuidadosamente.



Descarte do produto

Para minimizar o risco de possíveis perigos de infecção ou poluição ambiental, os componentes descartáveis do Hydrotac® devem ser eliminados em conformidade com as leis, regras, regulamentos e normas de prevenção de infecção aplicáveis e locais.

Hydrotac®

Possíveis efeitos adversos

Tal como qualquer outro dispositivo médico, este produto pode ter efeitos secundários, os quais podem não ocorrer em todos os usuários.

Efeitos secundários gerais do Hydrotac®:

- Em casos raros, pode causar reações alérgicas.
- Em casos raros, podem causar reações cutâneas locais (irritação, vermelhidão, inchaço, etc).
- Em casos raros, podem aderir demasiadamente à pele.
- Em casos muito raros, podem causar lesões cutâneas após a sua remoção.
- Em casos muito raros, podem permanecer partes da cobertura na ferida após a sua remoção.

Contraindicações

O Hydrotac® não é indicado para feridas muito exsudativas. Não utilizar Hydrotac® em pacientes com intolerância a qualquer um dos seus componentes.

Precauções especiais

Antes do tratamento de feridas de cicatrização difícil, é necessária uma avaliação clínica da condição da ferida, bem como da causa da dificuldade de cicatrização.

O tratamento com Hydrotac® não substitui o tratamento etiológico da dificuldade de cicatrização.

No caso de feridas clinicamente infectadas, e em áreas com ossos e tendões expostos, Hydrotac® só deverá ser utilizado sob supervisão de um profissional de saúde.

No caso de queimaduras de 2º e de 3º grau, Hydrotac® só pode ser utilizado sob supervisão de um profissional de saúde e depois de necrosectomia ou tratamento cirúrgico bem-sucedido.

Não utilizar Hydrotac® em conjunto com agentes de oxidação, como soluções de hipoclorito ou peróxido de hidrogênio. Estes componentes podem danificar a cobertura.

A utilização de Hydrotac® em crianças menores de 5 anos, mulheres grávidas ou a amamentar, não foi comprovada. Nestas situações, um profissional de saúde deve ser previamente consultado e o produto deve ser utilizado com precaução.



Visto não existirem dados disponíveis que suportem a utilização desta cobertura em grupos populacionais sensíveis, como por exemplo bebês, crianças, mulheres grávidas ou a amamentar, nem dados que indiquem o contrário, a utilização desta cobertura por estes grupos populacionais deverá ser efetuada com precaução e seguindo a recomendação do profissional de saúde.

A reutilização de dispositivos médicos descartáveis é perigosa. O reprocessamento de dispositivos, de modo a serem reutilizados, pode danificar gravemente a sua integridade e o seu desempenho. Informações adicionais são disponibilizadas mediante solicitação.

Observação para usuários e pacientes: qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e a autoridade competente do Estado-Membro no qual se encontra o usuário e/ou o paciente.

Armazenamento e Transporte

Armazene este produto em local fresco, ventilado, seco, ao abrigo da luz em temperatura entre 15 e 30°C.

Esterilização: Irradiação

Validade: 3 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha

Resp. Tec.: Camila S. S. Tavares. CREA – SP 5062442178

Código	Tamanho	QTD Embalagem
685832-3	10 x 10 CM	10
6858413	10 X 20 CM	10
685844-3	20 X 20 CM	03
685833-3	10 X 20 CM	03



Para saber mais sobre nossos produtos ou fazer um pedido, entre em contato com Hartmann em +55 (11) 3168-0226, comercial@hartmannbr.info ou visite hartmann.info/pt-BR

Registros Anvisa

HARTMANN
+3