

Hydrotac® Transparent

Descrição do produto

O Hydrotac® Transparent é uma cobertura de hidrogel transparente composto por poliuretano hidratado. Hydrotac® Transparent é revestido por uma película de poliuretano permeável ao vapor de água e impermeável a líquidos e bactérias.

Propriedades e modo de ação

O Hydrotac® Transparent produz umidade e absorve pequena quantidade de exsudato.

Deste modo cria-se um ambiente úmido, que estimula a cicatrização da ferida. O Hydrotac® Transparent garante uma remoção atraumática.

Devido à transparência, permite a inspeção da ferida sem remoção da cobertura.

Utilização prevista/Indicações

O Hydrotac® Transparent é adequado para o tratamento de feridas na fase de granulação e de epiteliação, sem ou com exsudato moderado.

O Hydrotac® Transparent destina-se à aplicação por profissionais de saúde ou pacientes e familiares treinados.

Instruções de Uso

- Limpe a ferida usando protocolos usuais;
- Seque cuidadosamente a pele ao redor;
- Escolha o tamanho do curativo Hydrotac® Transparent de forma que ultrapasse a borda da ferida de 1 a 2 cm.
- Se for necessário, o Hydrotac® Transparent pode ser recortado para obter o tamanho desejado, mas só é permitido fazê-lo com uma tesoura esterilizada.
- Retirar a cobertura de proteção de acordo com a numeração (1 e 2). Colocar o lado impregnado com gel voltado para a ferida e fixá-lo com produtos adicionais adequados.
- O Hydrotac® Transparent pode permanecer na ferida por até sete dias.
- Para a troca, descolar o Hydrotac® Transparent em um dos cantos e remove-lo cuidadosamente.



Contraindicações

Não utilizar Hydrotac® Transparent em pacientes com intolerância a qualquer um dos seus componentes, especialmente poliuretano, glicerina ou adesivo de base acrílica.

Não utilizar em feridas clinicamente infectadas e em queimaduras de 3º grau.

Efeitos Adversos

•Em casos raros, o Hydrotac® Transparent podem causar reações locais (irritação, reações cutâneas, p. ex. vermelhidão, inchaço).

•Em casos raros, o Hydrotac® Transparent podem causar reações alérgicas.

Se observar efeitos não indicados aqui, consulte o seu médico, farmacêutico ou profissional de saúde.

Precauções

Antes de cada tratamento de feridas de difícil cicatrização, é necessária uma avaliação médica da situação da ferida e das causas da dificuldade de cicatrização.

O tratamento com Hydrotac® Transparent não substitui o tratamento da causa de uma cicatrização comprometida da ferida.

A reutilização de dispositivos médicos destinados a uma única utilização é perigosa.

O reprocessamento de dispositivos, de modo a serem reutilizados, pode danificar gravemente a sua integridade e o seu desempenho.

Observação para usuários e pacientes: qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro no qual se encontra o usuário e/ou o paciente.

Hydrotac®

Transparent

Descarte do Produto

Para minimizar o risco de possíveis perigos de infecção ou poluição ambiental, os componentes descartáveis do Hydrotac® Transparent devem ser eliminados em conformidade com as leis, regras, regulamentos e normas de prevenção de infecção aplicáveis e locais.

Instruções Gerais

O produto pode sofrer descoloração com o passar do tempo, sem que tal tenha qualquer impacto no desempenho do mesmo. Manter afastado das crianças.

Armazenamento e Transporte

Armazene este produto em local fresco, ventilado, seco, ao abrigo da luz em temperatura entre 15° e 30°C.

Esterilização: Irradiação

Validade: 3 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha

Resp. Tec.: Camila S. S. Tavares. CREA – SP 5062442178

Código	Curativo	QTD Embalagem
6859060	10 x 10 cm	10
6859080	20 x 20 cm	10



Para saber mais sobre nossos produtos ou fazer um pedido, entre em contato com Hartmann em +55 (11) 3168-0226, comercial@hartmannbr.info ou visite hartmann.info/pt-BR

Registros Anvisa

HARTMANN
+