

Proximel® Basic

Non- Border

Descrição

O Proximel® Basic Non Border consiste em uma cobertura de poliuretano composta por duas camadas sendo elas: uma camada superior protetora em filme de poliuretano à prova d'água e permeável ao vapor e uma camada de espuma absorvente de poliuretano. Desenvolvida para estimular o gerenciamento dinâmico de fluidos, a composição em duas camadas proporciona um ambiente úmido ideal.

Indicações

O Proximel® Basic Non Border para traqueostomia é indicado para o cuidado adjacente às cânulas de traqueostomia e aplicações tubulares.

Instruções de uso

- Limpe a ferida/região usando protocolos usuais.
- Seque cuidadosamente a pele ao redor.

Orientações para aplicação do curativo:



Advertências e Precauções

- Não utilizar o produto quando a ferida estiver infectada.
- Em caso de sinais de infecção (por exemplo, dor excessiva ou inchaço), consulte um profissional de saúde para o tratamento adequado da infecção.
- Deve ser observado o uso inadequado ou troca excessiva da cobertura, particularmente em pacientes com pele frágil pois, pode ocasionar vermelhidão e sensibilidade. Se isso acontecer, descontinue o uso.
- Não use esse produto com agentes oxidantes como soluções de peróxido de hidrogênio ou de hipoclorito.
- Esse produto é de uso único.
- Conteúdo estéril desde que a embalagem interior esteja intacta. Não reesterilizar.



- Abrir a embalagem primária, compromete a barreira de esterilização. Portanto, não é recomendado ser guardado para posterior uso.
- Manter fora do alcance de crianças.
- Não utilize por mais de 7 dias.
- Não há restrições especiais do número ou duração das reaplicações.
- Apenas para uso externo.

Contraindicações

O produto não é indicado para indivíduos que são sensíveis aos componentes da cobertura.

Troca do Curativo

A troca da cobertura deve ocorrer em intervalos de tempos regulares, normalmente até 7 dias (ou em intervalos mais frequentes, se necessário).

NOTA: Cada cobertura não poderá permanecer por mais de sete dias.

IMPORTANTE: Cabe ao profissional de saúde responsável decidir com que frequência a monitorização e as trocas devem ser realizadas em cada caso particular. Esta decisão baseia-se na avaliação do local da ferida pelo profissional de saúde, bem como do estado de saúde do paciente.

Em todas as áreas da cobertura, a área deve ser completamente limpa e preparada, de acordo com as instruções do profissional de saúde e os padrões de higiene aplicáveis.

Inspecione a região e certifique-se de que ela se encontra limpa.

Aplique uma nova cobertura de acordo as instruções de uso apresentadas neste documento.

Proximel® Basic

Non- Border

Descarte do Produto

De modo a minimizar os riscos de infecção potencial ou poluição ambiental, os componentes descartáveis do PROXIMEL® BASIC NON BORDER devem cumprir os procedimentos de descarte de acordo com os regulamentos locais e as normas de prevenção de infecção.

Armazenamento e Transporte

Armazenar em local fresco, ventilado, seco, ao abrigo da luz e em temperatura entre 5° e 40°.

Esterilização: Óxido de Etileno.

Validade: 3 anos.

Fabricante: HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO.

- China DISTRIBUÍDO POR HARTMANN USA, Inc. – Estados Unidos Registro Anvisa: 80170310097 Resp. Técnica: Camila Siedlarczy Schimite Tavares – CREA-SP: 5062442178



Código	Tamanho do Curativo	QTD por Caixa
15713110	8 x 8 cm Trach	10



Registros Anvisa

Para saber mais sobre nossos produtos ou fazer um pedido, entre em contato com Hartmann em +55 (11) 3168-0226, comercial@hartmannbr.info ou visite hartmann.info/pt-BR

HARTMANN
+