

Proximel®

Descrição

A cobertura multicamadas com silicone e bordas Proximel® é composta por cinco camadas: uma camada superior protetora em filme de poliuretano e adesivo acrílico à prova d'água e permeável ao vapor, uma camada superabsorvente (de fibra de celulose, polietileno, polipropileno e copolímero acrilato), uma camada de não tecido, uma camada de espuma absorvente de poliuretano e uma camada perfurada de contato com a ferida em silicone. Desenvolvida para estimular o gerenciamento dinâmico de fluidos, a composição em cinco camadas, proporciona um ambiente úmido ideal para a ferida, promovendo uma cicatrização mais rápida e ajudando a reduzir o risco de maceração. A camada de fibra superabsorvente oferece absorção superior e mantém o exsudato afastado da ferida. O silicone presente na camada de contato com a ferida permite que a cobertura seja removida sem perder a aderência, atraumático, minimiza a dor e o trauma da ferida e da pele ao redor. A versão Sacral foi desenvolvida exclusivamente para a região sacral. A versão Heel foi desenvolvida para a região de calcâneo.

Indicação

Proximel® é indicado para uma ampla gama de feridas, tais como: tratamento de lesões por pressão, feridas traumáticas, feridas cirúrgicas, úlceras em membros inferiores, áreas doadoras, lesões por fricção, queimaduras (1º e 2º grau). Além disso é indicada para prevenção de lesões por pressão por atuar nos quatro fatores extrínsecos que predispõem as lesões por pressão: pressão, fricção, cisalhamento e microclima. A cobertura também pode ser utilizada em feridas secas/necróticas em combinação com géis.

Instruções de uso

Limpe a ferida usando protocolos usuais. Seque cuidadosamente a pele ao redor. Remova as películas protetoras e aplique o lado aderente na ferida. Não estique. A cobertura deve cobrir pelo menos 1–2 cm da pele seca ao redor da ferida para os tamanhos menores, 5 cm para tamanhos maiores.



Tempo de troca

A troca da cobertura deve ocorrer em intervalos de tempos regulares, normalmente até 7 dias (ou em intervalos mais frequentes, se necessário)

NOTA: cada cobertura não poderá permanecer na ferida durante mais de sete dias.

IMPORTANTE: Cabe ao profissional de saúde responsável decidir com que frequência a monitorização da ferida e a troca da cobertura deve ser realizada em cada caso particular. Esta decisão baseia-se na avaliação do local da ferida, bem como do estado de saúde do paciente.

PROXIMEL® pode ser retirado de forma atraumática. Para isso, solte uma extremidade e remova - o cuidadosamente.

Em cada troca da cobertura, a ferida deve ser completamente limpa e preparada, de acordo com as instruções do profissional de saúde e os padrões de higiene aplicáveis.

Aplique novamente a cobertura de acordo as instruções de uso apresentadas neste documento.

Advertências

- Este produto é de uso único;
- Não utilize o produto se a embalagem estiver danificada ou aberta;
- Não utilize o curativo de espuma com silicone PROXIMEL® com agentes oxidantes como soluções de hipoclorito ou peróxido de hidrogênio;
- Descontinue o uso em caso de vermelhidão ou sensibilidade;
- Conteúdo estéril desde que a embalagem interior esteja intacta;
- Não reesterilizar;
- Manter fora do alcance de crianças.

Proximel®

Precauções

- Não utilizar o produto quando a ferida estiver infectada;
- Apenas para uso externo.

Contraindicações

O produto não é indicado para indivíduos que são sensíveis a cobertura ou seus componentes.

Armazenamento e transporte

Armazenar em local fresco, ventilado, seco, ao abrigo da luz e em temperatura entre 5° e 40°.

Descarte

O descarte deve ser tratado conforme a legislação sanitária local.

Esterilização: Óxido de Etileno.

Validade: 3 anos.

Fabricante: HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO. - China DISTRIBUÍDO POR HARTMANN USA, Inc. – Estados Unidos

Resp. Técnica: Camila Siedlarczy Schimite Tavares – CREA-SP: 5062442178



Código	Tamanho do Curativo	QTD por Caixa
14100000	7,6 x 7,6 cm	10
14200000	10 x 10 cm	10
14300000	12,7 x 12,7 cm	10
14400000	15,2 cm x 15,2 cm	5
14600000	17,8 x 17,3 cm Sacral S	5
14700000	23,4 x 23,4 cm Sacral L	5
14800000	25,4 x 23,9 cm Heel	5
14900000	15 x 20 cm	5



Registros Anvisa

Para saber mais sobre nossos produtos ou fazer um pedido, entre em contato com Hartmann em +55 (11) 3168-0226, comercial@hartmannbr.info ou visite hartmann.info/pt-BR