

Proxime!® Ag

Descrição

A cobertura de espuma com silicone e borda PROXIMEL® AG é composto por cinco camadas: uma camada superior protetora em filme de poliuretano e adesivo acrílico à prova d'água e permeável ao vapor, uma camada superabsorvente (de fibra de celulose, polietileno, polipropileno e copolímero acrílico), uma camada de não tecido, uma camada de espuma absorvente de poliuretano constituída por 0,25 a 0,35 mg/cm² de íons de prata e uma camada perfurada de contato com a ferida em silicone.

Desenvolvida para estimular o gerenciamento dinâmico de fluidos, a composição em cinco camadas da cobertura proporciona um ambiente úmido ideal para a ferida, reduzindo o risco de maceração. A camada de fibra absorvente absorve o exsudato da ferida. O silicone presente na camada de contato com a ferida permite que a cobertura seja removida sem perder a aderência, atraumático, minimiza a dor e o trauma da ferida e da pele ao redor. A versão sacral foi desenvolvida exclusivamente para a região sacral.

Indicações

As coberturas de espuma com silicone e borda PROXIMEL® AG são particularmente indicadas no tratamento de feridas exsudativas, mantendo um ambiente de cicatrização úmido.

Os compostos de íons de prata presentes na cobertura ajudam a reduzir a colonização bacteriana.

A cobertura de espuma com silicone e borda PROXIMEL® AG é indicada para uma ampla gama de feridas, tais como: lesões por pressão, úlceras em membros inferiores, feridas traumáticas, feridas operatórias/ cirúrgicas, queimaduras superficiais e parciais, e lesões nos pés de pessoas com diabetes.

Instruções de Uso

Limpe a ferida usando protocolos usuais. Seque cuidadosamente a pele ao redor. Remova as películas protetoras e aplique o lado aderente na ferida. Não estique. A cobertura deve cobrir pelo menos 1–2 cm da pele seca ao redor da ferida para os tamanhos menores, 5 cm para tamanhos maiores.



Troca de Curativo

A troca de cobertura deve ocorrer em intervalos de tempos regulares, normalmente até 7 dias (ou em intervalos mais frequentes, se necessário).

NOTA: Cada cobertura não poderá permanecer na ferida durante por mais de sete dias.

IMPORTANTE: Cabe ao profissional de saúde decidir com que frequência a monitorização da ferida e a trocas e devem ser realizadas em cada caso particular. Esta decisão baseia-se na avaliação do local da ferida pelo profissional de saúde, bem como no estado de saúde do paciente. PROXIMEL®AG pode ser retirado de modo praticamente indolor.

Para isso:

1. Cada vez que a cobertura é trocada, a ferida deve ser completamente limpa e preparada, de acordo com as instruções do profissional de saúde e os padrões de higiene aplicáveis;
2. Inspeção a ferida e certifique-se que ela se encontra limpa;
3. Aplique o novo cobertura de acordo as instruções de uso apresentadas neste documento.

Proxime!® Ag

Advertências

- Este produto é de uso único;
- Proibido reprocessar;
- A cobertura PROXIMEL® AG é estéril;
- Não utilize o produto se a embalagem estiver danificada ou aberta;
- Não utilize o PROXIMEL® AG com agentes oxidantes como soluções de hipoclorito ou peróxido de hidrogênio;
- Descontinue o uso em caso de vermelhidão, sensibilidade;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Não há evidências clínicas de que o produto pode ser utilizado em feridas secas. Desta forma, não se sugere o uso do produto em feridas secas;
- O curativo de espuma com silicone e borda PROXIMEL® AG não substitui a necessidade de terapia sistêmica ou outro tratamento adequado da infecção clínica;
- Não utilize a cobertura PROXIMEL® AG durante exames ou tratamento por radiação como: raios-x, ressonância magnética (RM), ultrassom ou diatermia;
- Evite contato com eletrodos ou géis condutores durante medições eletrônicas como eletrocardiogramas (ECG) e eletroencefalograma (EEG);
- Coberturas com prata(Ag) podem causar uma descoloração transitória do leito da ferida e da pele ao redor;

Precauções

Não utilizar o produto se a embalagem estiver rasgada ou danificada.

Trata-se de um produto descartável. Não reutilizar ou reesterilizar. Apenas para uso externo.



Contraindicações

Não utilize a cobertura de espuma com silicone e borda PROXIMEL® AG em pacientes com sensibilidade conhecida à prata ou a qualquer outro componente do curativo.

Armazenamento e Transporte

Armazenar em local fresco, ventilado, seco, ao abrigo da luz e em temperatura entre 5° e 40°.

Descarte

O descarte deve ser tratado conforme a legislação sanitária local.

Esterilização: Óxido de Etileno.

Validade: 3 anos.

Fabricante: HARTMANN USA, Inc – Estados Unidos Origem: China

Resp. Técnica: Camila Siedlarczy Schimite Tavares – CREA-SP: 5062442178

Código	Tamanho do Curativo	QTD por Caixa
15100000	7,6 X 7,6 CM	10
15200000	10 X 10 CM	10
15300000	15,2 X 15,2 CM	5
15400000	10 X 30, 5 CM	5
15500000	17,8 X 17,3 CM Sacral	5



Para saber mais sobre nossos produtos ou fazer um pedido, entre em contato com Hartmann em +55 (11) 3168-0226, comercial@hartmannbr.info ou visite hartmann.info/pt-BR

Registros Anvisa

HARTMANN

