

Proximel®

Non- Border AG

Descrição

Proximel® Non Border AG é uma cobertura de espuma com silicone sem borda, composta por três camadas: uma camada superior protetora em filme de poliuretano à prova d'água e permeável ao vapor, uma camada de espuma absorvente de poliuretano impregnada de 0,25 a 0,35 mg/cm² íons de prata e uma camada perfurada de contato com a ferida em silicone.

Desenvolvida para estimular o gerenciamento dinâmico de fluidos, a composição em três camadas da cobertura proporciona um ambiente úmido ideal para a ferida, que promove uma cicatrização mais rápida e ajuda a reduzir o risco de maceração. A camada de espuma absorvente promove alta absorção. O silicone presente na camada de contato com a ferida permite que a cobertura seja removida de forma atraumática, sem perder a aderência.

PROXIMEL® NON BORDER AG proporciona eficácia antibacteriana sustentada por até 7 dias. A cobertura pode ser recortável para uso no mesmo paciente.

Indicação

As coberturas de espuma com silicone sem borda PROXIMEL® NON BORDER AG são particularmente indicadas no tratamento de feridas exsudativas, mantendo um ambiente de cicatrização úmido. Os compostos de íons de prata ajudam a reduzir a colonização bacteriana.

A cobertura de espuma com silicone sem borda PROXIMEL® NON BORDER AG é indicada para uma ampla gama de feridas, tais como: Lesões por pressão, úlceras em membros inferiores, feridas traumáticas, feridas operatórias cirúrgicas, queimaduras superficiais e parciais.

Instruções de uso

- Limpe a ferida usando protocolos usuais.
- Seque cuidadosamente a pele ao redor.
- Remova as películas protetoras e aplique o lado aderente na ferida.
- Não estique.
- O curativo deve cobrir pelo menos 1–2 cm da pele seca ao redor da ferida para os tamanhos menores, 5 cm para tamanhos maiores.



Tempo de troca

As trocas devem ocorrer em intervalos de tempos regulares, normalmente até 7 dias (ou em intervalos mais frequentes, se necessário).

NOTA: cada cobertura não poderá permanecer na ferida durante mais de sete dias.

IMPORTANTE: Cabe ao profissional de saúde decidir com que frequência a monitorização da ferida e a troca em cada caso particular. Esta decisão baseia-se na avaliação do local da ferida pelo profissional de saúde, bem como do estado de saúde do paciente.

Proximel® Non Border AG pode ser retirado de modo praticamente indolor. Para isso, solte uma extremidade e remova cuidadosamente a cobertura.

A cada troca da cobertura, a ferida deve ser completamente limpa e preparada, de acordo com as instruções do profissional de saúde e os padrões de higiene aplicáveis.

Inspecione a ferida e certifique-se que ela se encontra limpa. Aplique a nova cobertura de acordo as instruções de uso apresentadas neste documento.

Advertências

- Este produto é de uso único.
- Proibido reprocessar.
- O curativo de espuma com silicone sem borda PROXIMEL® NON BORDER AG é estéril.
- Não utilize o produto se a embalagem estiver danificada ou aberta. Não utilize o curativo de espuma com silicone sem borda PROXIMEL® NON BORDER AG com agentes oxidantes como soluções de hipoclorito ou peróxido de hidrogênio.
- Descontinue o uso em caso de vermelhidão ou sensibilidade.
- Manter fora do alcance de crianças.
- Não deixe a mesma cobertura sobre a ferida por mais de 7 dias.
- Não há evidências clínicas de que o produto pode ser utilizado em feridas secas. Desta forma, não se sugere o uso do produto em feridas secas.

Proximel®

Non- Border AG

- O PROXIMEL® NON BORDER AG não substitui a necessidade de terapia sistêmica ou outro tratamento adequado da infecção clínica.
- Não utilize PROXIMEL® NON BORDER AG durante exames ou tratamento por radiação como: raios-x, ressonância magnética (RM), ultrassom ou diatermia. PROXIMEL® NON BORDER AG não é seguro para Ressonância Magnética.
- Evite contato com eletrodos ou géis condutivos durante medições eletrônicas como eletrocardiogramas (ECG) e eletroencefalograma (EEG).
- A redução da colonização ou do crescimento microbiano no dispositivo não demonstrou estar correlacionada com a redução das infecções em pacientes. Não foram realizados estudos clínicos para avaliar a redução da infecção em pacientes.
- Curativos com prata podem causar uma descoloração transitória do leito da ferida e da pele ao redor.

Precauções

Não utilizar se a embalagem estiver rasgada ou danificada.
Trata-se de um produto descartável. Não reutilizar ou reesterilizar.
Apenas para uso externo.

Contraindicações

- Não utilize PROXIMEL® NON BORDER AG em pacientes com sensibilidade conhecida à prata ou a qualquer outro componente da cobertura.

Armazenamento e transporte

- Armazenar em local fresco, ventilado, seco, ao abrigo da luz e em temperatura entre 5° e 40°.

Descarte

O descarte deve ser tratado conforme a legislação sanitária local.



Esterilização: Óxido de Etileno.

Validade: 3 anos.

Fabricante: HARTMANN USA, Inc – Estados Unidos Origem: China

Resp. Técnica: Camila Siedlarczy Schimite Tavares – CREA-SP: 5062442178

Código	Tamanho do Curativo	QTD por Caixa
15713117	10 cm x 10 cm	10
15713118	15 x 15 cm	5
15713119	20 x 20 cm	5



Para saber mais sobre nossos produtos ou fazer um pedido, entre em contato com Hartmann em +55 (11) 3168-0226, comercial@hartmannbr.info ou visite hartmann.info/pt-BR

Registros Anvisa

HARTMANN

