

Reservatório

Vivano® Tec Pro

*Para Terapia por Pressão
Negativa Vivano®*

Descrição

Reservatório da terapia para retenção de exsudato proveniente da drenagem por Pressão Negativa realizada com equipamento Vivano® Tec Pro. Possui sachê e filtro antiodores. Composto por polipropileno, polietileno, policloreto de vinila, carboximetilcelulose, carvão ativado, copolímero acrilonitrila butadieno estireno, polímero super absorvente.

Uso pretendido

O coletor de exsudato destina-se a ligar o Vivano® Tec Port à unidade Vivano® Tec Pro e a recolher e armazenar o exsudato durante o tratamento com terapia de feridas por pressão negativa (TFPN). O Reservatório para exsudato Vivano® Tec Pro foi desenvolvido para ser usado unicamente em conjunto com o Vivano® System da PAUL HARTMANN AG ou com o sistema de terapia por pressão negativa ATMOS S042 NPWT.

Indicação

Indicado na Terapia De Feridas por Pressão Negativa para o tratamento de feridas complexas.

Instruções de uso

Após realizar o curativo com Vivano® Med Foam e Hydrofilm, conectar a ponta da conexão do Vivano® Tec Port na conexão da extensão do reservatório. Encaixar o reservatório na parte posterior do equipamento Vivano® Tec Pro e iniciar a terapia. Após o tempo de tratamento designado ou quando o reservatório atingir sua capacidade máxima, ele deverá ser descartado. Caso necessário, outro reservatório deverá ser encaixado e conectado ao dreno para dar sequência ao tratamento.

Tempo de troca

O recipiente para exsudato é de uso individual, devendo ser substituído a cada paciente. Durante a terapia a troca deve ocorrer no mínimo 1x por semana e/ou em intervalos menores conforme necessidade e avaliação pelo profissional de saúde responsável pela terapia.

Precauções gerais

- Manter o equipamento na posição vertical para que o reservatório seja preenchido de maneira correta.



- Uso único, não reutilizar;
- Não reesterilizar;
- Não utilizar caso a embalagem se encontre danificada.

Apresentação

Duas opções de reservatórios: 300 ml para feridas pouco exsudativas e 800 ml para feridas muito exsudativas. Produto estéril embalado individualmente.

Armazenagem e transporte

Armazene este produto em local fresco, ventilado, seco, ao abrigo da luz em temperaturas até 30°C.

Código	Reservatório	QTD Embalagem
4095259	300 ml	1
4095229	800 ml	1

Validade: 03 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha.

Origem: República Tcheca

Esterilizado por óxido de etileno

Resp. Tec.: Camila S. S. Tavares. CREA – SP 5062442178



Para saber mais sobre nossos produtos ou fazer um pedido, entre em contato com Hartmann em +55 (11) 3168-0226, comercial@hartmannbr.info ou visite hartmann.info/pt-BR