

Vivano® Tec

Port

Descrição

Dreno de silicone estéril, flexível e macio, utilizado em Terapia de Feridas por Pressão Negativa Vivano® Tec Pro, responsável pela drenagem do exsudato e consequente limpeza da ferida. Sua composição reduz o risco por pontos de pressão e é aplicável na maioria dos tipos de feridas. Possui duplo lúmen: um para drenagem do exsudato e outro que envia fluxos de ar a cada 5 minutos para promover a calibragem adequada do equipamento, garantindo que a pressão programada seja precisa. Possui adesivo transparente de poliuretano para fixação do curativo.

Uso pretendido

O sistema de conexão para a terapia de feridas por pressão negativa destina-se a transferir pressão negativa ao leito da ferida e a remover o exsudato dela.

O Vivano® Tec Port foi desenvolvido para ser usado unicamente em conjunto com o sistema Vivano® System da PAUL HARTMANN AG ou com o sistema de terapia por pressão negativa ATMOS S042 NPWT. OBSERVAÇÃO: Para a colocação de um curativo completo, no mínimo, os seguintes componentes são necessários:

- Vivano® Med Foam
- Curativo de película transparente Hydrofilm®

O Vivano® Tec Port destina-se apenas ao uso em seres humanos.

O Vivano® Tec Port pode ser usado em hospitais e em ambientes de cuidados domiciliares.

IMPORTANTE: o Vivano® Tec Port apenas pode ser utilizado por um médico ou profissional qualificado, conforme a legislação do país, de acordo com as indicações do médico.

Indicações

O Vivano® System é utilizado em feridas, para auxiliar a cicatrização por segunda intenção.

O tratamento com o Vivano® Tec Port em conjunto com o Vivano® System é adequado para os seguintes tipos de feridas:

- feridas crônicas;
- feridas agudas;
- feridas traumáticas;
- feridas deiscências;
- feridas infectadas;
- úlceras (ex.: vasculares ou diabéticas);
- lesões por pressão;
- enxertos;
- queimaduras de espessura parcial;
- incisões cirúrgicas (apenas com uma adequada camada de contato com a ferida, por exemplo, Atrauman® Silicone).



Para saber mais sobre nossos produtos ou fazer um pedido, entre em contato com Hartmann em +55 (11) 3168-0226, comercial@hartmannbr.info ou visite hartmann.info/pt-BR

Registros Anvisa



Composição

Port: Copolímero de Estireno-Acrílico.

Tubo: Elastômero de Silicone.

Película adesiva: Filme transparente de poliuretano revestido com adesivo de acrilato.

Apresentação

Padrão: Porta de 12 x 12 cm com tubo de 60 cm.

Instruções de uso

Após preencher a cavidade da ferida com espuma Vivano® Med e cobrir com Hydrofilm®, realizar um pequeno corte no filme de aproximadamente 2 cm e fixar o Vivano® Tec Port com o centro de acesso exatamente em cima do furo. Conectar o tubo na unidade de tratamento Vivano® Tec Pro e selecionar o modo de terapia adequado.

Armazenagem e transporte

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores. Armazenar em local seco e fresco, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar direta.

O Vivano® Tec Port destina-se apenas a utilização única.

Reesterilização

O Vivano® Tec Port é fornecido estéril. Não reesterilize, pois pode causar declínio geral na eficiência terapêutica e potencialmente levar à contaminação e/ou infecção da ferida.

Descarte do produto

Para minimizar o risco de possíveis perigos de infecção ou poluição ambiental, os componentes descartáveis do Vivano® Tec Port devem ser eliminados de acordo com as leis, regras, regulamentos e normas de prevenção de infecção locais aplicáveis.

Código Padrão: 4095553

Validade: 5 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG

Origem: República Tcheca

Resp. Tec.: Camila S. S. Tavares. CREA – SP 5062442178