

Vivano®Tec

Conector Y - Pro

Descrição

Conector em Y utilizado para realizar Terapia de Feridas por Pressão Negativa Vivano®Tec Pro em dois locais ao mesmo tempo. Responsável por conectar duas saídas do Vivano®Tec Port na unidade de tratamento Vivano®Tec Pro.

Indicação

Indicado na Terapia de Feridas por Pressão Negativa com a unidade de tratamento Vivano®Tec Pro quando há duas feridas.

Composição

Copolímero composto pela combinação de acrilonitrila, butadieno e estireno.

Apresentação

Produto estéril embalado individualmente.

Instruções de uso

Após preencher a cavidade das feridas com espuma Vivano®Med e cobrir com Hydrofilm®, realizar um pequeno corte no filme de cada ferida de aproximadamente 2 x 3 cm e fixar o Vivano®Tec Port com o centro de acesso exatamente em cima do furo. Conectar o Vivano®Tec Port ao Vivano®Tec Conector Y- Pro. Conectar o Vivano®Tec Conector Y- Pro à extensão do reservatório. Encaixar o reservatório ao equipamento e iniciar a terapia.

Armazenagem e transporte

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores. Armazenar em local seco e fresco, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar direta. O Vivano®Tec Conector Y- Pro destina-se apenas a utilização única.



Código	Embalagem	QTD Embalagem
4095576	Único	1

Validade: 05 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG.

Origem: Alemanha

Esterilizado por óxido de etileno

Resp. Tec.: Camila S. S. Tavares. CREA – SP 5062442178



Para saber mais sobre nossos produtos ou fazer um pedido, entre em contato com Hartmann em +55 (11) 3168-0226, comercial@hartmannbr.info ou visite hartmann.info/pt-BR

Registros Anvisa

HARTMANN
+