

Zetuvit®

Plus Silicone Border

Descrição

O Zetuvit® Plus Silicone Border é um curativo de poliacrilato superabsorvente autoadesivo estéril com interface em silicone. O curativo inclui uma camada de contato e bordas adesivas, ambas em silicone, uma camada de filme protetor em poliuretano semipermeável e um núcleo absorvente entre essas duas camadas. O núcleo absorvente é composto por um tecido não tecido (viscose e polipropileno) branco e hidrofílico. A camada absorvente é fabricada em celulose e poliacrilato superabsorvente (SAP), para a absorção e retenção de exsudato, e está envolvida em um tecido de celulose hidrofílica para distribuir o líquido. Ele é recoberto por um tecido não tecido hidrofóbico verde de polipropileno. O filme protetor em poliuretano é permeável ao ar, mas impermeável à água, permitindo assim que o paciente possa tomar banho de chuveiro. Disponíveis em formatos anatômicos para região sacral e calcâneo e nas versões ovais para utilização em regiões de difícil adaptação e regiões de articulações.

Propriedades e Mecanismo de Ação

O Zetuvit® Plus Silicone Border apoia o gerenciamento de fluidos, pois absorve e retém até níveis elevados de exsudato no núcleo absorvente. Possui a capacidade de redistribuir a pressão. Ele inclui uma interface de silicone micro aderente e bordas adesivas, para garantir que não sejam necessários materiais adicionais para fixar o curativo. A película de revestimento é impermeável à água, bactérias e vírus. A camada de contato em silicone permite a troca atraumática e sem dor.

Indicação

O Zetuvit® Plus Silicone Border é adequado para o tratamento de vários tipos de feridas exsudativas: feridas agudas (queimaduras, feridas pós-operatórias e feridas traumáticas) e feridas crônicas (úlceras venosas e arteriais, lesões por pressão, feridas nos pés de pessoas com diabetes ou feridas tumorais).

O Zetuvit® Plus Silicone Border é um curativo de poliacrilato superabsorvente autoadesivo estéril e descartável, com interface de silicone para o tratamento a longo prazo (> 30 dias) de feridas agudas e crônicas com níveis moderados a elevados de exsudato. Também é indicado para uso combinado com terapias compressivas.

O curativo deve ser trocado conforme prescrição de um profissional de saúde, ou se o exsudato atingir a borda do núcleo absorvente verde.



Modo de aplicação

- Limpe a ferida utilizando uma solução fisiológica ou seguindo as instruções de um profissional de saúde.
- Escolha um curativo com o tamanho e forma adequados para a ferida, certificando-se de que o núcleo absorvente verde exceda as margens da ferida em cerca de 1 a 2 cm. Não corte o enchimento absorvente verde. A borda transparente pode ser cortada para adaptar o curativo a áreas do corpo específicas.
- Antes de aplicar o curativo e depois de enxaguar a ferida, certifique-se que a pele em torno da ferida esteja seca, garantindo assim a aderência do curativo.
- Retire todas as películas protetoras. Aplique o curativo com lado aderente sobre a ferida, de forma que o lado verde não fique virado para a ferida.
- Pressione as bordas adesivas com firmeza e evite a formação de rugas nas bordas, para que o curativo não se mova.
- O curativo pode permanecer na ferida por até 7 dias, dependendo do estado da ferida e do protocolo clínico estabelecido.



Figure 1: Application of Zetuvit Plus Silicone Border Sacrum. [7]



Figure 2: Application of Zetuvit Plus Silicone Border Heel. [8]

Zetuvit®

Plus Silicone Border

Contraindicações

Não use o Zetuvit® Plus Silicone Border em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos seus componentes.

Cuidados Especiais

- Não corte o enchimento absorvente verde. A borda transparente pode ser cortada para adaptar o curativo a áreas do corpo específicas.
- Antes de tratar uma ferida com dificuldade de cicatrização, é necessário consultar um profissional de saúde para estabelecer um diagnóstico clínico. O tratamento com Zetuvit® Plus Silicone Border não substitui o tratamento das causas da dificuldade de cicatrização da ferida. Em caso de sinais clínicos de infecção, esta deverá ser controlada por meio de tratamento adequado, antes de usar o curativo:
- Em todo caso, siga protocolo clínico estabelecido.
- Visto não existirem dados disponíveis que corroborem a adequação do uso deste curativo em grupos populacionais sensíveis, como bebês, crianças, mulheres grávidas ou em períodos de amamentação, nem dados que indiquem o contrário, o uso deste curativo por esses grupos populacionais deverá ser efetuado com precaução e seguindo a recomendação de um médico.
- Não é recomendado ficar de pé apoiando-se no local onde o curativo foi aplicado no caso de feridas nos pés.
- Antes de abrir a embalagem do produto, inspecione-a cuidadosamente quanto aos indícios de danos. Não use o produto caso existam sinais evidentes de danos, tais como fissuras, sulcos, perfurações ou vedações não uniformes, quebradas ou incompletas.
- A reutilização de dispositivos médicos descartáveis é perigosa.
- O reprocessamento de dispositivos, feito com o intuito de reutilizá-los, pode danificar gravemente sua integridade e seu desempenho. Informações disponíveis mediante solicitação.

Armazenagem e Transporte

Armazene este produto em local fresco, ventilado, seco, ao abrigo da luz em temperaturas até 30°C.



Para saber mais sobre nossos produtos ou fazer um pedido, entre em contato com Hartmann em +55 (11) 3168-0226, comercial@hartmannbr.info ou visite hartmann.info/pt-BR

Registros Anvisa



Esterilização: Óxido de etileno

Validade: 3 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha

Origem: França

Resp. Tec.: Camila S. S. Tavares. CREA – SP 5062442178

Código	Tamanho do Curativo	QTD por Caixa
4139000	8 x 8 cm	10
4139010	10 x 10 cm	10
4139020	12,5 x 12,5 cm	10
4139030	15 x 15 cm	10
4139240	17,5 x 17,5 cm	10
4139050	20 x 20 cm	10
4139040	16 x 26 cm	10
4139060	18 x 18 cm Sacral	10
4139070	23 x 23 cm Sacral	10
4139080	13 x 15,5 cm Oval	10
4139090	12 x 23 cm Oval	10
4139110	25 x 25 cm Heel	10