

Zetuvit® Plus Silicone

Descrição do Produto

O Zetuvit® Plus Silicone é uma cobertura de poliacrilato superabsorvente estéril com interface em silicone. A cobertura é composta por uma camada de silicone perfurada de contato com a ferida e um núcleo absorvente. O núcleo absorvente dispõe de um tecido não tecido (viscose e polipropileno) branco e hidrofílico. A camada absorvente é fabricada em celulose e poliacrilato superabsorvente (SAP), para a absorção e retenção de exsudato, e está envolvida em um tecido de celulose hidrofílica para distribuir o líquido. O revestimento do curativo é feito de tecido não tecido verde de polipropileno, hidrofóbico impermeável, mas permeável ao ar para permitir a troca gasosa.

Propriedades e Modo de Ação

O Zetuvit® Plus Silicone absorve e retém todos os níveis de exsudato no núcleo absorvente.

A camada de contato em silicone, garante transferência do exsudato para o núcleo, evita que a cobertura saia do lugar, além proporcionar remoção atraumática e sem dor.

Uso Pretendido

O Zetuvit® Plus Silicone é um curativo de poliacrilato superabsorvente estéril e descartável, com interface em silicone para o tratamento a longo prazo (duração >30 dias) de feridas agudas e crônicas em todos os níveis exsudação. É utilizado por profissionais da saúde em adultos e em populações especiais de acordo com recomendação e acompanhamento. Recomendado para uso em ambientes clínicos e assistência domiciliar. Pode ser considerado o uso combinado com soluções de limpeza e antissépticos tópicos, coberturas primárias e fixação adicional. Pode ser utilizado em combinação com terapias de compressão.

Indicações

O Zetuvit® Plus Silicone é adequado para o tratamento de vários tipos de feridas em todos os níveis de exsudato: feridas agudas (queimaduras, feridas pós-operatórias e feridas traumáticas) e feridas crônicas (úlceras venosas, arteriais e mistas, lesões por pressão, feridas nos pés de pessoas com diabetes ou feridas tumorais).

Modo de Aplicação

- Limpe a ferida utilizando uma solução fisiológica ou seguindo as instruções de um profissional de saúde.
- Escolha uma cobertura com o tamanho adequado para a ferida, certificando-se de que o núcleo absorvente do curativo exceda as margens da ferida em cerca de 1 a 2 cm. Não corte o curativo.



- Antes de aplicar a cobertura e depois de enxaguar a ferida, certifique-se que pele em torno da ferida esteja seca, garantindo assim a aderência;
- Retire todas as películas protetoras. Aplique a cobertura com o lado em silicone aderente sobre a ferida, de forma que o lado verde não fique virado para a ferida;
- Fixe usando, por exemplo, uma atadura Peha-haft ou qualquer outro modo de fixação adequado ou, se necessário, aplique ataduras de compressão conforme as instruções do profissional de saúde.
- Pode permanecer na ferida por até 7 dias, dependendo do estado da ferida e do protocolo clínico estabelecido.
- Deve ser considerada a troca conforme prescrição de um profissional de saúde, ou se o exsudato atingir a borda da cobertura.

Contraindicações

Não use o Zetuvit® Plus Silicone em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos seus componentes.

Precauções Especiais

- Não corte a cobertura.
- Antes de tratar uma ferida com dificuldade de cicatrização, é necessário consultar um profissional de saúde para estabelecer um diagnóstico clínico. O tratamento com Zetuvit® Plus Silicone não substitui o tratamento das causas da dificuldade de cicatrização da ferida. Em caso de sinais clínicos de infecção, esta deverá ser controlada por meio de tratamento adequado, antes poder utilizar a cobertura.
- Em todo caso, siga protocolo clínico estabelecido.
- Visto não existirem dados disponíveis que corroborem a adequação do uso desta cobertura em grupos populacionais sensíveis, como bebês, crianças, mulheres grávidas ou em períodos de amamentação, nem dados que indiquem o contrário, o uso por esses grupos populacionais deverá ser efetuado com precaução e seguindo a recomendação de um profissional de saúde.

Zetuvit® Plus Silicone



- Não é recomendado ficar de pé apoiando-se no local onde a cobertura for aplicada no caso de feridas nos pés.
- Antes de abrir a embalagem do produto, inspecione-a cuidadosamente quanto aos indícios de danos. Não use o produto caso existam sinais evidentes de danos, tais como fissuras, sulcos, perfurações ou vedações não uniformes, quebradas ou incompletas.
- A reutilização de dispositivos médicos descartáveis é perigosa. O reprocessamento de dispositivos, feito com o intuito de reutilizá-los, pode danificar gravemente sua integridade e seu desempenho. Informações disponíveis mediante solicitação.

Descarte do Produto

Para minimizar o risco de possíveis perigos de infecção ou poluição ambiental, os componentes descartáveis do dispositivo médico devem ser eliminados em conformidade com as leis, regras, regulamentos e normas de prevenção de infecção aplicáveis e locais. Descarte o dispositivo médico juntamente com os resíduos domésticos.

Código	Tamanho do Curativo	QTD por Caixa
413811-0	8 x 8 cm	10
413812-0	12,5 x 12,5 cm	10
413813-0	10 x 20 cm	10
413815-0	20 x 25 cm	10

Armazenamento e Transporte

Armazene este produto em local fresco, ventilado, seco, ao abrigo da luz em temperaturas até 30°C.

Esterilização: Óxido de etileno

Validade: 3 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha

Origem: França

Resp. Tec.: Camila S. S. Tavares. CREA – SP 5062442178



Para saber mais sobre nossos produtos ou fazer um pedido, entre em contato com Hartmann em +55 (11) 3168-0226, comercial@hartmannbr.info ou visite hartmann.info/pt-BR

Registros Anvisa